



Bruksanvisning

Xplore

För Xplore Small, Xplore Medium, Xplore Large

Bruksanvisning för Xplore

Innhold

1. Innledning	4
2. Vad är Xplore.....	4
2.1 Avsedd användning (Intended use)	4
2.2 Indikationer.....	4
2.3 Kontraindikationer	4
2.4 Försiktighetsåtgärder.....	5
2.5 Utbildning och assistenter	5
3. Säkerhetskontroll	6
4. Varningar 	7
5. Teknisk beskrivning.....	10
5.1 Underrede:.....	11
5.2 Stag, säte, höftstöd, bröststöd och huvudstöd:.....	12
5.3 Korrigeringssystem för ben och fot.....	13
6. Anpassning till användaren	14
6.1 Kontroll av mått på Xplore före leverans:.....	14
6.2 Prova ut Xplore till en användare:	14
7. Hur justeras Xplore	17
7.1 Dämpare.....	17
7.2 Justera höjden på staget	18
7.3 Justera höjden på bröststödet, höftbygeln och sätet.....	20
7.4 Justera bredden på bröststagen och höftbygeln	21
8. Använda Xplore	22
8.1. Användningstid	22
8.2. Utbildning.....	22
8.3. Sko.....	22
8.4. Förberedelse innan användning	22
8.5. Hur kommer användaren i Xplore.....	22
8.6. Säkra användaren i Xplore	22
8.7. Hur användaren kommer ur Xplore	23
9. Utförande av individuella justeringar och efterjusteringar	24
9.1. Individuell justering / utprovning	24
9.2. Justering uppföljning.....	24
10. Transport.....	25
11. Teknisk information	27

11.1. Märkning	27
11.2. Specifikationer och dimensioner Xplore	28
12. Ekstrautrustning	31
12.1. Huvudstöd	31
12.2. Sidohandtag	31
12.3. Ledsagarhandtag	32
12.4. Korrigeringssystem för lår och fötter	33
12.5. Används inte	35
12.6. Riktningsspärr för hjul	35
12.7. Envägslager bakhjul	35
12.8. Stödhandtag	35
12.9. Säkerhetsrem	36
12.10. Backspärr	36
13. Tester och godkännningar för Xplore	37
14. Avfallshantering	37
15. Rengöring och underhåll	37
a. Rengöring	37
b. Justering för användartillväxt och funktionsändring	37
c. Inspektion och underhåll	38
16. Återanvändning	39
17. Garanti	39
18. Försäkran om överensstämmelse	40
Bilaga 1 – Utbildning av användare och/eller assistent	41
Bilaga 2 – Monteringsanvisning	43

Friskrivningsklausul: Det kan finnas mindre skillnader mellan bilder i bruksanvisningen och den faktiska produkten.

1. Innledning

Grattis till att du valt Xplore, ett gånghjälpmedel från Made for Movement. Innan du använder produkten ber vi dig att läsa bruksanvisningen och följa den.

2. Vad är Xplore

Xplore är ett gånghjälpmedel för personer med nedsatt motorisk funktion. Det gör att personen kan gå och kan användas i alla vardagssituationer där personen vill delta.

2.1 Avsedd användning (Intended use)

Xplore är ett gånghjälpmedel för personer med nedsatt motorik och är avsedd för barn, unga och vuxna med väsentligt nedsatt eller ingen förmåga att stå och gå självständigt. Xplore är ett personligt hjälpmedel som är anpassat för den enskilda användaren. Den som anpassar och justerar Xplore har genomgått utbildning i användningen av produkten.

Xplore finns i 3 storlekar och passar användare i storleksintervallet 80 till 180 cm, och med en maximal kroppsvikt på 80 kg. Xplore är ett hjälpmedel för individuellt bruk i hemmet, skolan eller förskolan under överinseende av en ansvarig person som har fått utbildning i användningen av produkten, till exempel en förälder eller assistent.

2.2 Indikationer

Användare av Xplore har måttlig till betydande skada på det neuromuskulära systemet och rörelserelaterade funktioner i de övre och nedre extremiteterna (muskelstyrka, muskeltonus, uthållighet, koordination, ofrivilliga rörelser, rörelsemönster) med nedsatt aktivitet till följd av sjukdom eller skada på hjärnan (t.ex. cerebrala pares, syndrom, trauma), ryggmärgsskada (t.ex. paraplegiska syndrom på grund av spinaltumörer eller trauma) eller neuromuskulära sjukdomar (t.ex. muskeldystrofier).

2.3 Kontraindikationer

Den som förskriver Xplore ansvarar för att utvärdera eventuella risker och fördelar med användningen av hjälpmedlet.

Följande bör övervägas:

- Kontrakturer
- Osteoporos/benskörhet
- Öppna hudsår som kan komma i kontakt med delar av Xplore
- Cirkulationsstörningar
- Andningssjukdomar
- Hjärtproblem

2.4 Försiktighetsåtgärder

Det har inte rapporterats några negativa effekter eller biverkningar från att använda Xplore.

Riskanalysen visar att användare med ett eller flera av följande tillstånd bör konsultera en läkare eller terapeut innan hjälpmedlet används, för att bedöma om nyttan med användningen uppväger risken för skada eller andra möjliga biverkningar:

- Allvarliga missbildningar (i ryggraden och nedre extremiteterna) och/eller svåra/fixerade kontrakturer i de nedre extremiteterna, som förhindrar lämplig positionering
- Osteoporos med tidigare eller misstänkta spontana frakturer i nedre extremiteterna
- Cirkulationsstörningar
- Andningsbesvär
- Hjärtsjukdom
- Epilepsi med okontrollerbara anfall
- Svår spasticitet som förhindrar lämplig positionering och gång i hjälpmedlet
- Smärta

2.5 Utbildning och assistenter

Innan du använder Xplore måste den ansvariga personen ha fått utbildning i användningen av hjälpmedlet (enligt bilaga 1) av en representant för Made for Movement eller annan kvalificerad person.

Representanten är vanligtvis en anställd hos Made for Movement, en återförsäljare eller hjälpmedelskonsulent som har genomgått utbildning.

Utbildningen består av en demonstration av alla viktiga funktioner, förflyttning, infästning, säkerhet, användning och felsökning enligt beskrivning i bilaga 1. Dessutom ska bruksanvisningen läsas, förstås, användas och behållas för framtida referens.



Viktigt: Inställningarna på produkten får inte ändras på något annat sätt än vad som beskrivs i denna manual. Vidare kan produkten endast justeras av en Made for Movement-representant, eller personer som har fått utbildning i hur man anpassar produkten.

3. Säkerhetskontroll

Vad är en säkerhetskontroll?	Säkerhetskontroll är en kontroll som görs för att upptäcka slitage på viktiga delar.
Typer av säkerhetskontroll:	Dagligen: De viktigaste delarna kontrolleras dagligen före användning. Månadsvis: Övriga slitdelar kontrolleras för slitage en gång i månaden.
Varför ska man utföra:	För att upptäcka slitage och byta ut slitna delar innan en eventuell del går sönder.
Vem ska utföra:	Utbildade assistenter. Endast utbildade assistenter får kontrollera + använda produkten.
Vad du ska utföra:	Teststegen beskrivs nedan.
Vad ska man göra om fel upptäcks:	Kontakta din Made for Movement-representant för att komma överens om åtgärder/reparationer.

Daglig säkerhetskontroll:

Dagligen, före användning, ska följande kontrolleras av assistenten:

1. **Bälten** – Kontrollera att alla bälten är intakta och utan synliga skador och att allt är intakt.
2. **Spännerna** - Kontrollera att spännerna är intakta och låser väl.

Månadsvis säkerhetskontroll:

En gång i månaden ska följande kontrolleras av assistenten:

1. **Bälten** – Kontrollera att alla bälten är intakta och utan synliga skador och att allt är intakt.
2. **Spännerna** - Kontrollera att spännerna är intakta och låser väl.
3. **Bröst- och höftstöd** – Ta tag om båda bröststöden och försök sedan att trycka, dra och vrida stöden i alla riktningar. Upprepa för höftstöden. Kontrollera att alla delar sitter ordentligt.
4. **Chassi** – Slå på bromsen, lyft upp produktens front genom att hålla fast vid och höja de 2 framhjulen. Försök att trycka, dra och rotera framaxeln i alla riktningar medan du håller i hjulen. Kontrollera att alla delar sitter tight.
5. **Fotavskiljare** - Kontrollera att fotavskiljaren är intakt och ordentligt fastsatt.
6. **Hjul** – Kontrollera att bakhjulen inte kan röra sig i sidled på axeln mer än 3 mm.



Kontakta din hjälpmedelscentral eller Made for Movement-representant om fel upptäcks för att komma överens om åtgärder/reparationer. Använd inte produkten innan detta är lost.



För fler tips om hur du utför säkerhetskontrollerna, skanna QR-koden och granska instruktionerna för säkerhetskontroll.

4. Varningar

Allmänna varningar

- 1) Produkten får endast användas under överinseende av en utbildad, ansvarig person.
- 2) Endast personer som har fått utbildning i användningen av produkten får använda produkten tillsammans med användaren. Se bilaga 1 för detaljer om utbildningens innehåll.
- 3) Kontraindikationer och försiktighetsåtgärder bör alltid klargöras av läkare eller terapeut innan produkten används för första gången. Om det finns en användarrisk på grund av användarens tillstånd, bör läkaren eller terapeuten ange att fördelarna överväger riskerna före användning.
- 4) Utför alltid den dagliga säkerhetskontroll före användning.
- 5) Utför alltid den månatliga säkerhetskontroll för att upptäcka slitage.
- 6) Om några avvikelser upptäcks under förkontrollen måste produkten ställas i ordning före användning.
- 7) Under användning kan vissa justerskruvar skruvas loss något med tiden på grund av rörliga delar, justeringsdelar eller vridning i produkten. Dra åt lösa skruvar före användning.
- 8) Produkten ska vid behov anpassas för att säkerställa att produkten passar användaren med avseende på användartillväxt och användarfunktionalitet. Justeringarna måste utföras av en Made for Movement-representant som är utbildad för att utföra detta.
- 9) Produkten måste justeras, användas och ställas in enligt beskrivningen i denna bruksanvisning.
- 10) Ingen modifiering av denna produkt är tillåten. Ändringar kan leda till farliga situationer, produkthaveri och bristande efterlevnad av certifieringen.
- 11) Montera inte andra tillbehör på produkten. Detta kommer att leda till bristande efterlevnad av certifieringen.
- 12) Produkten är ett hjälpmedel och får under inga omständigheter användas av personer som produkten inte är anpassad till.
- 13) Bröst- och höftbältet ska alltid fästas när användaren befinner sig i produkten. Bröst- och höftbältena kan ha lösare passform vid användning, men kan inte tas av då detta är för säkerhets skull.
- 14) Se till att det alltid finns ett klädesplagg mellan huden på användaren och där produkten kommer i kontakt med användaren. Detta kommer att minimera risken för sår orsakade av gnag och eventuella allergiska reaktioner. Alla material i produkten som är i kontakt med användaren är allergitestade.
- 15) Produkten ska endast användas med skor som passar produkten.
- 16) Använd aldrig produkten, med eller utan användare, om den omgivande temperaturen överstiger den maximala temperaturen 40°C. Kontrollera produktens ytemperatur före användning. Produktens temperatur kan påverkas av radiatorer och direkt solljus etc
- 17) Vissa delar av produkten har en klämrisk på grund av rörliga eller rörliga delar. Dessa är märkta med en klämrisketikett. Var extra uppmärksam på dessa områden när användaren går in och ur produkten och under användning. Var försiktig och var uppmärksam på var användaren placerar sina händer, och var du i din roll som arbetsledare håller i produkten.
- 18) Användning av syntetiska kläder kan orsaka en ofarlig statisk chock i produkten.

- 19) Använd alltid produkten i ett väl upplyst rum, så att alla etiketter och manöverkontroller lätt kan ses.
- 20) Produkten ska förvaras på ett sätt som hindrar människor från att använda produkten som en leksak eller från att påverka produktens inställningar.
- 21) Produkten ska förvaras i ett torrt rum.
- 22) Produkten får inte användas i en fuktig miljö (dusch, tvättplats etc)
- 23) Kablarna, bältena, remmarna, vajrarna och styrremmen kan leda till strypning eller andra skador.
- 24) Se till att hålla produkten under ständig uppsikt under användning och förvara den på ett sätt som förhindrar obehöriga att komma in i produkten.
- 25) Produkten ska säkras ordentligt vid transport för att undvika transportskador och skador på bilens interiör.
- 26) Användning av denna produkt intill eller staplad med andra produkter bör undvikas eftersom det kan leda till felaktig användning. Om sådan användning är nödvändig bör denna produkt och den andra produkten observeras för att verifiera att de fungerar normalt.
- 27) Produkten ska endast lyftas i ramen, ingen av de andra delarna. Lyft inte produkten med användaren i produkten, och tryck inte ner handtaget med användaren i produkten för att lyfta framhjulen för att passera hinder. Detta kan bryta handtaget.
- 28) Vid användning av bord: Bordet ger ingen extra säkerhet – håll alltid bröstremmen säkert när användaren är i produkten.
- 29) Xplore får aldrig användas nära lågor eller öppen eld, eftersom bälten och vaddering inte är brandsäkra

Specifikt för Xplore

- 1) Produkten kan användas både inomhus och utomhus i torr miljö. Se till att ytan är jämn och plan, och utan hinder, för att förhindra att användaren välter. Vid användning av Xplore på ojämnt underlag och/eller i mindre lutningar ska ledsagarhandtaget användas. En assistent ska då alltid hålla i handtaget under användning och ha ständig uppsikt över användaren. All annan användning av produkten sker på egen risk.
- 2) Tryck inte på Xplores säte, stag eller nackstöd med användaren i produkten. Använd det medföljande handtaget.
- 3) Använd säkerhetsremmen (mellan användarens ben) om Xplore ska användas utan sätet.

Symboler som används i bruksanvisningen:



Denna symbol indikerar att texten som följer bör läsas mycket noggrant.




Denna symbol indikerar att följande text kan ge dig bra tips.



Denna symbol indikerar klämrisk i produkten.



Tryck inte på produktens kolonn

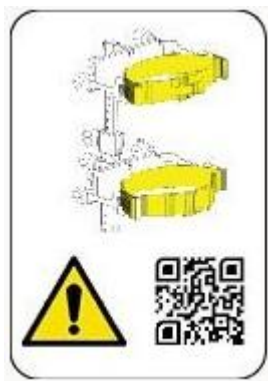


Säkerhetskontroll påminnelsemärke.

Utför alltid dagliga och månatliga säkerhetskontroller. Se kapitel 3 för detaljer.



Varning/Läs bruksanvisning märket. Detta märke indikerar en specifik försiktighetsåtgärd som ska vidtas. Läs bruksanvisningen för detaljer om varningen.

5. Teknisk beskrivning

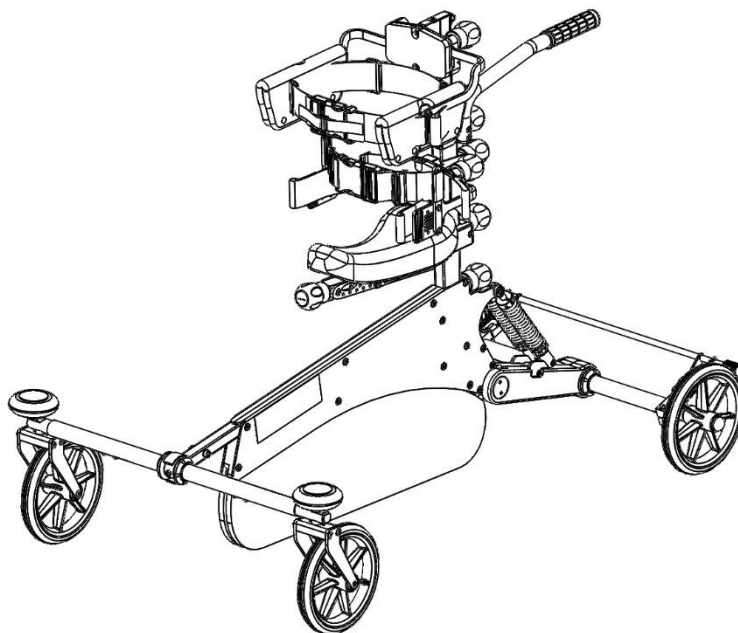

Figur 1: Xplore


Xplore Small	Rekommenderad brukarlängd 80-120 cm, och max användarvikt 30 kg
Xplore Medium	Rekommenderad brukarlängd 110-150 cm, och max användarvikt 50kg
Xplore Large	Rekommenderad brukarlängd 140-180 cm, och max användarvikt 80 kg

Xplore är ett individuellt anpassat hjälpmedel. För beställning av produkten krävs information om användarens totala längd och vikt. Individuell anpassning av hjälpmedlet till brukaren görs av en Made for Movement representant eller annan kvalificerad person som är utbildad i detta.

Serienummer:

Hver Xplore har ett eget, unikt serienummer. Numret är placerat under ramen.

5.1 Underrede:

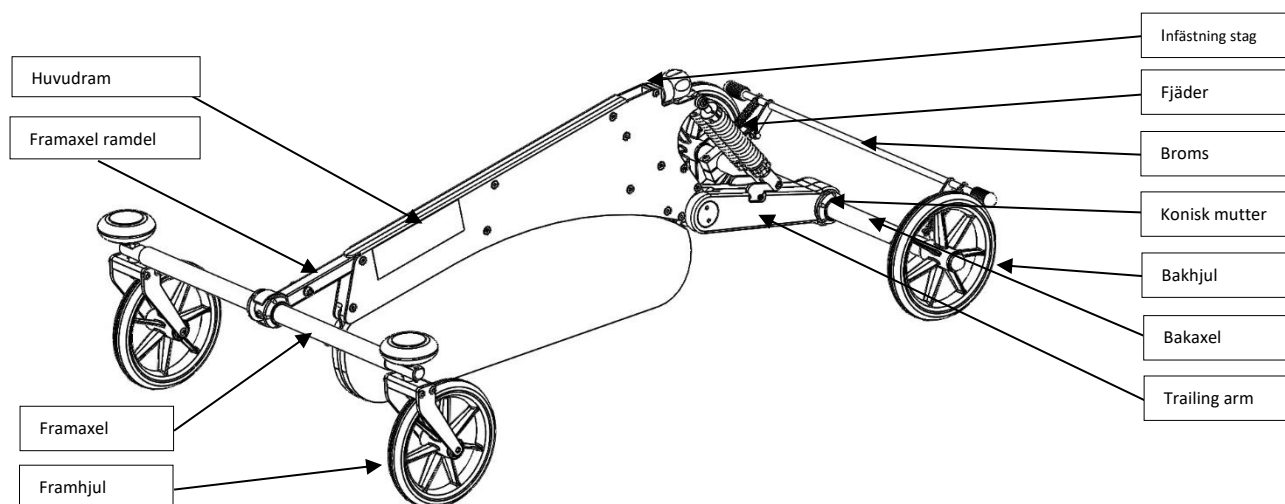

Figur 2: Xplore underrede

Chassit har en H-form. Framaxeln och bakaxeln är anslutna till huvudramen. När en användare går i Xplore kommer han/hon att ha ett ben på varje sida av huvudramen, mellan framaxeln och bakaxeln. Huvudramen mellan användarens ben kommer att hindra användaren från att korsa benen när han använder Xplore.

Understället har fyra hjul med en diameter på 185 mm. Bakhjulen är fasta och kan inte rotera. Bakhjulen har en broms som kan aktiveras. Framhjulen kan fritt rotera 360°. Bakhjulen är monterade på bakaxeln som har en fast bredd. Framhjulen är kopplade till framaxeln som har en fast bredd.

Framaxeln är utrustad med horisontella hjul. Dessa fungerar som väggavvisande om användaren kolliderar i möbler, väggar eller liknande.


Om produkten ska transporteras kan bakaxeln tas bort från huvudramen. Lossa de avsmalnande muttrarna och ta bort axlarna från huvudramen. Ett specialverktyg för de avsmalnande muttrarna kommer med produkten. Se bild på nästa sida.



Figur 3: Xplore verktyg för bakaxel

Läs kapitel 10. I detta kapitel förklaras hur du demonterar och monterar Xplore för transport. Bakaxeln för Xplore kommer i en bredd. Bakaxeln är kopplad till en släparm som är upphängd med en eller två stötdämpare. Spjället levereras med gul fjäder som standard. Framaxeln är ansluten till en framaxelramdel monterad på huvudramen. Huvudramen är anslutningspunkten till alla andra delar och kommer att ta upp belastning som genereras av användaren. Staget med fäste för sits, höft, bröst och huvudstöd placeras vertikalt i huvudramen. Staget kan justeras i höjd.

5.2 Stag, säte, höftstöd, bröststöd och huvudstöd:

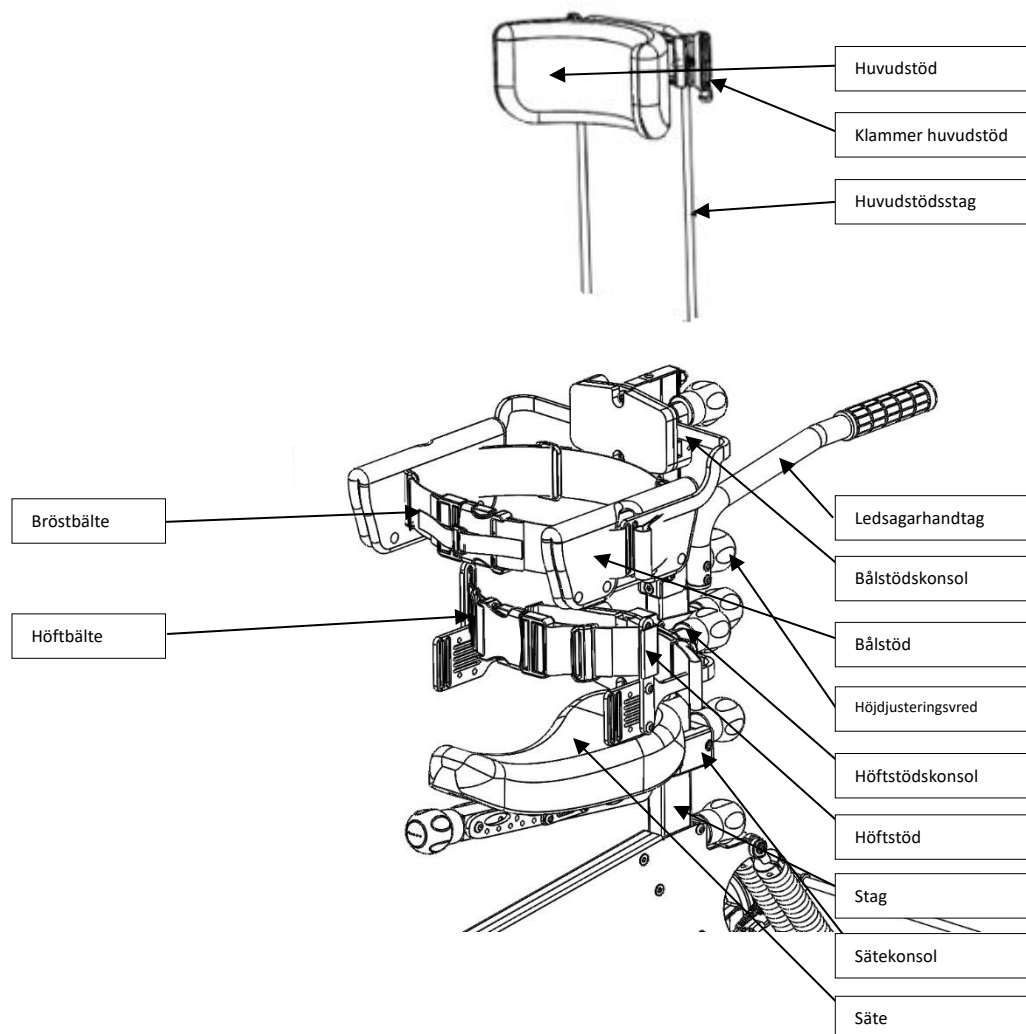

Figur 4: Xplore Stag med huvudstöd och ledsagarhandtag monterat

Staget består av en övre och en nedre del, där den övre delen är fäst på insidan av den nedre delen. Sitsen och höftstödet är fästa på den nedre stagdelen, medan bröststödet är fäst på den övre stagdelen.

Det nedre staget fästs på chassits högsta punkt och går ner i chassit och hålls på plats av en klämma med fästs-kruv framför spjällen i chassit. Här justeras stagets nedre höjd.

Sitsen är fastsatt i staget med ett sätesfäste. Sitsen är avtagbar och justerbar i höjdd.

Höftstödet fästs i staget med ett höftstödsfäste. Höftstödet kan justeras i höjd och bredd. Höftstödet har två fästa bälten, ett bälte på framsidan av bäckenet och ett på baksidan av bäckenet. Höftstödet i kombination med bälten stabiliserar och placerar brukarens bäcken i hjälpmedlet.

Höjden på den övre stagdelen justeras med höjdjusteringsfästet på staget. Medföljande handtag kan även monteras på detta fäste med ett separat extra fäste. Höjden på medföljande handtag justeras genom att justera höjden på den nedre stagdelen.

Bröststödet fästs i staget med ett bröststödsfäste. Bröststödet kan justeras i bredd och höjd. Bröststödet har två fästa bälten, ett bälte på framsidan av bröstet och ett på baksidan av bröstet. Bröststödet i kombination med bältena stabiliserar och positionerar brukarens överkropp i hjälpmedlet.

En huvudstödstång kan fästas på bröststödsfästet. Höjden på nackstödet kan justeras genom att antingen justera höjden på nackstödsfästet i bröststödsfästet, eller genom att justera nackstödsfästet vertikalt genom att lossa skruvarna som håller fast det i nackstödsfästet. Huvudstödsfästet har en universell design vilket gör att eventuella specialanpassade bälten eller andra huvudstöd har möjliga fästpunkter i detta fäste.

Xplore kan användas utan sätet om ansvarig förskrivare / terapeut bedömer att detta är säkert. Som en säkerhetsåtgärd ska en säkerhetsrem fäst vid bröstbältet och baksidan av Xplore, som går mellan användarens ben, användas om sätet inte används. Detta är för att förhindra att användaren glider ur produkten om användaren förlorar muskeltonus i benen under användning.

5.3 Korrigeringssystem för ben och fot

Om det finns ett behov av att korrigera benen när du går, kan ett korrigeringssystem monteras på Xplore. Korrektionssystemet består av manschetter som fästs på låren och/eller fötter och som är kopplade via remmar till framaxeln och till u-röret som är monterat på staget.

Mer information om hur du använder detta finns i kapitel 12.4



Figur 5: Xplore korrigeringssystem

6. Anpassning till användaren

Att välja storlek på Xplore baseras på personens totala längd och vikt.

6.1 Kontroll av mått på Xplore före leverans:

Storleken på Xplore väljs utifrån användarens längd och vikt. Om användarens längd och/eller vikt ligger nära rekommenderade mått och/eller användaren har stora ofrivilliga rörelser/spasticitet kan det bedömas om en större storlek är lämpligare. Andra fjäderuppsättningar än standardfjädrar kan också övervägas. Xplore kontrolleras för funktion och kvalitet innan den levereras för slutmontering.

6.2 Prova ut Xplore till en användare:

Anpassningen av Xplore kommer att göras av en representant från Made For Movement eller en annan kvalificerad person. Anpassningen kommer att göras i skolan, hemma eller på den plats där köparen av produkten ser det som mest lämpligt.

- **Grovinställning:**

- Understället placeras på ett plant underlag.
- Höftbygelns höjd placeras vid användarens trochanter. Tips: Mät från fotsula till användarens trochanter medan användaren ligger ned. Se bild under var trochanter är på kroppen.
- Höftbygelns bredd placeras 1-2cm bredare än användarens höftbredd på varje sida.
- Sätets höjd placeras så högt att säteskonsolen kommer i kontakt med höftbygelkonsolen på staget.
- Bröststödet högst punkt placeras i underkant av armhålan .
- Bröststödet bredd placeras 1-2cm bredare än användarens bröstbredd på varje sida.
- Se till att de grovt justerade stöden och bälten sitter ordentligt fast. Flytta användaren till sätet och säkra först användarens höft och bröst. Kom ihåg att alltid säkra användaren i sätet medans bältena fästs så att användaren inte faller ur produkten. Nu är användaren säkrad i produkten och finjustering kan utföras.

- **Fininställning.**


- Sätet:
 - Sätet kan nu sänkas för att hitta önskad belastning och markkontakt för användaren. Kom ihåg att hålla både det främre handtaget på sätet och den bakre monteringsvredet när du justerar höjden och har ett uppåt grepp under justeringen, så använd inte den nedåt. Användaren säkras också i denna fas genom att ha stöd under armarna.
- Höften:

- Höftbygeln kan justeras i höjd så att främre höftbältet är placerat över höftböjaren och inte hindrar användarens flexion (böjning) av höften. Bakre höftbältet skall ligga ca mitt på användarens rumpa.
- Höftbygelbredden kan justeras olika på användare för att ge mer rörelsefrihet.
- Höftbältets längder fram och bak kan släppas upp eller dras åt, så att användaren kan positioneras framåt eller bakåt i produkten i höftområdet.
- Bröst/bål:
 - Brösthöjden kan nu sänkas ned till önskad överkropps nivå. Ju högre upp bröststödet är ju mer stöd och support får användaren i produkten, och ju lägre bröststödet är ju mer rörelsefrihet får användaren i produkten. Det är viktigt att det inte tillåts mer rörelsefrihet i överkroppen än användaren kan hantera säkert.
 - Brösthöjdens bredd kan justeras utåt från användaren för att ge mer rörelsefrihet.
 - Brösthöjden skall ALLTID användas, då det också är en säkerhetsfunktion som hindrar användaren att ramla ut ur produkten. Om en användare behöver lite överkroppsstöd, bör bröststödet ALLTID användas, men genom att sänka och bredda kan det justeras till en nivå där det väldigt lite stör användarens rörelsefrihet, samtidigt som säkerheten säkerställs.
 - Längden på fram- och baksidan av bälten kan lossas eller dras åt så att användaren kan positioneras framåt eller bakåt i produkten i bröstområdet.
- Bröst-höftinteraktion: Genom att justera bröstet och höftbältenas längd kan användaren placeras i produkten framåt och bakåt i både bröstet och höftområdet. På detta sätt kan en användare räta eller luta lätt i produkten.
- Extrautrustning som kan korrigera användaren i produkten:
 - När huvudstöd används kan detta justeras i höjd till önskad nivå. Se kap. 12.1 Huvudstöd för detaljer.
 - När du använder ett lår- och fotkorrigeringssystem, se kapitel 0 för information om hur du ställer in detta.
- Fininställning resultat:
 - Rätt användarinställning framför produkten: Användare vinkelrätt mot marken så långt det är praktiskt möjligt
 - Rätt användarinställning i produkten sett från sidan: Användare vinkelrätt mot marken, eventuellt något framåtvinklat läge (1-3 grader)
- **Utprovning:** Användaren står nu i Xplore. Hårdheten på fjädern till dämparen kan nu justeras så att användaren kan få mesta möjliga dynamiska rörelse. Användaren står nu med

belastning i skorna, men trycket till golvet kan oavsett av belastning justeras med höjd på stag och/eller sätet.



Viktigt: Xplore får endast justeras av en representant från Made For Movement eller annan kvalificerad person utbildad av Made For Movement.

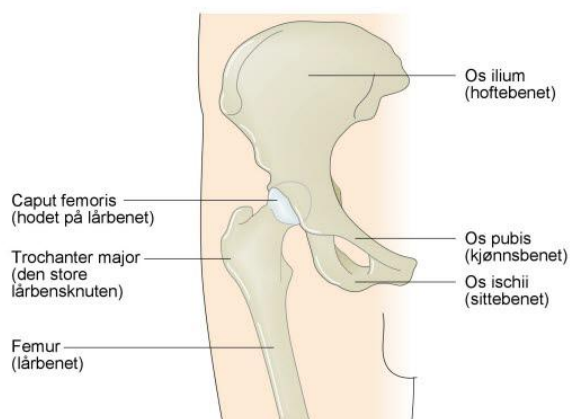


Figur 5: Illustration på hur Trochanter hittas på användarens lårben.


7. Hur justeras Xplore

7.1 Dämpare

- **Varianter:** Xplore levereras med en dämpare på Small och två dämpare på Medium och Large
- **Hårdheten på dämparen:** Den korrekta nivån på dämparen ställs in av en Made for Movement-representant vid den första inställningen. Om dämparens hårdhet behöver ändras senare kan den justeras enligt följande: Lossa låsmuttern för hand två tre varv. Om du vill ha en hårdare dämpare, vrid justeringsmuttern medurs. Medurs ger en mjukare dämpare. Utför justeringen lika på den andra dämparen. När du har justerat dämparen, dra åt låsmuttern (3) mot justermuttern.
- **Specialinställning:** Vid speciella behov kan fjädrar bytas ut utöver standard inställning. MFM har 2 olika fjädrar tillgängliga för specialinställning. Detta kan vara aktuellt om en användare maximerar fjädringen genom användarens tyngd och/eller rörelsemönster så att nedersta delen av ramen kommer i kontakt med golvet. Då kan man först försöka att dra åt fjädern/fjädrarna , och om detta inte fungerar kan man byta till en starkare fjäder.

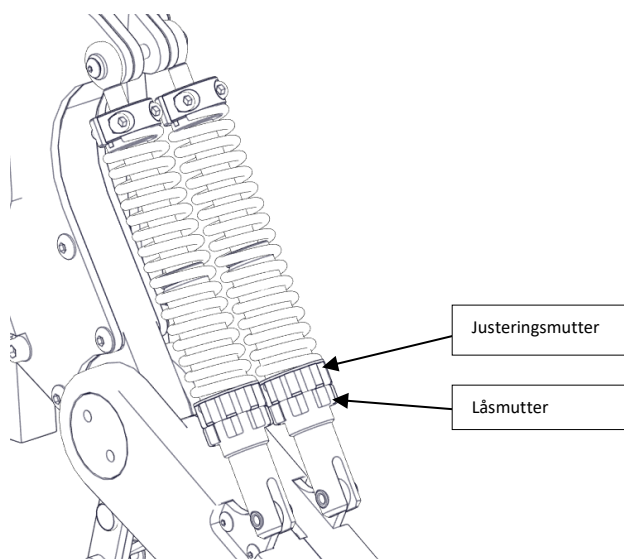

Figur 6: Xplore Dubbel dämpare

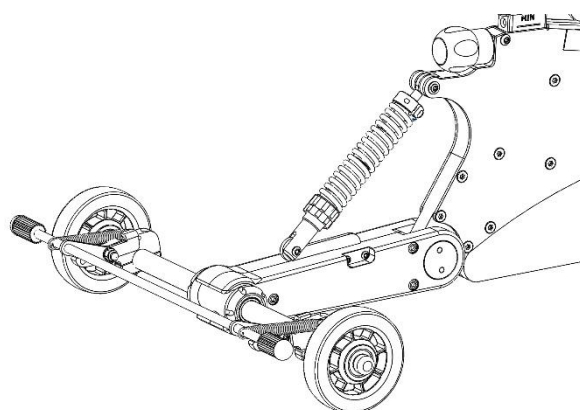


Figur 7: Xplore Enkel dämpare

7.2 Justera höjden på staget


Xplore Finns i 3 storlekar, för att veta vilken storlek som passar till användaren se kap.5.

Varje enskild storlek tillåter en tillväxtlängd på cirka 40 cm (från minimum till maximum). Storleken på produkten väljs utifrån användarens längd och vikt. Längdjustering görs genom att justera stag, sits, höftstöd och bröststödshöjd.

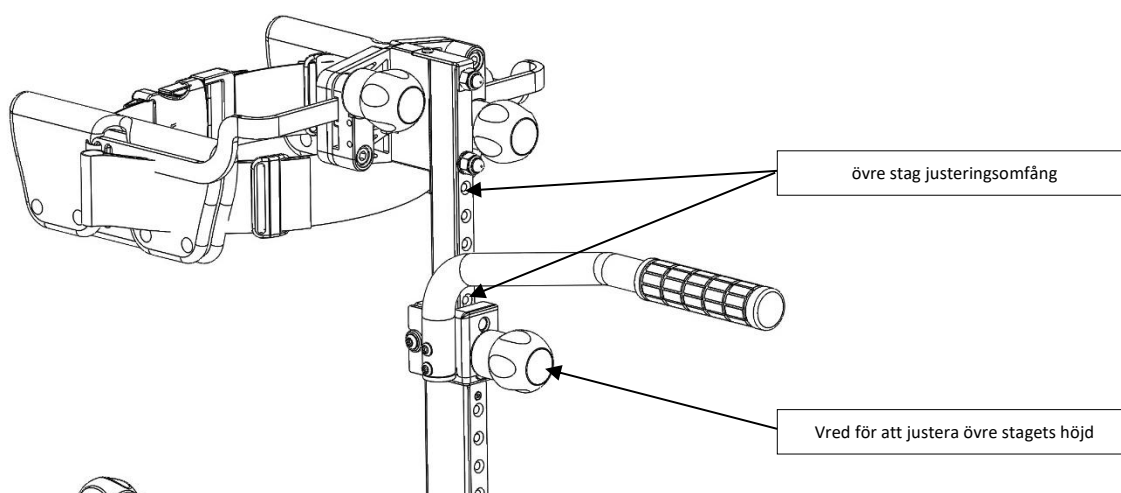

Figur 8: Xplore Övre stag

Det övre stagets höjd justeras genom att lossa staghöjdsvredet, skjuta stag till önskad höjd och dra åt vredet igen. Kolumnen är märkt med minimal och maximal höjdjustering.

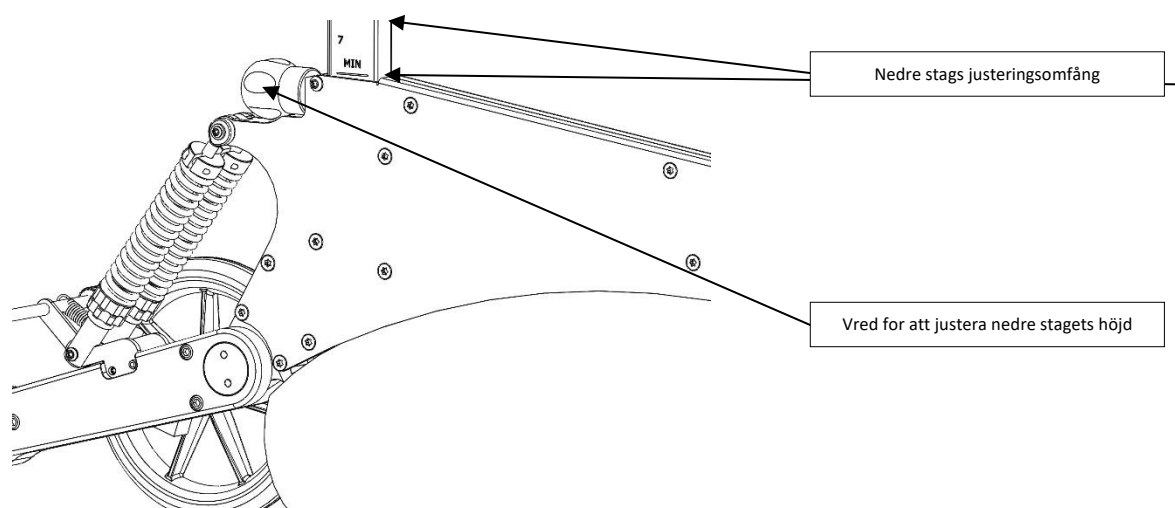

Figur 9: Xplore Nedre stag

Nedre stagets höjd justeras genom att lossa stagets höjdjustering, ändra stagen till önskad höjd, och dra åt vredet. Kolumnen är märkt med minimal och maximal höjdjustering.



Viktigt: Se till att kolumnen är sänkt till minimimärket (eller lägre) i ramen.



Viktigt: Xplore får endast justeras av en representant från Made For Movement eller annan kvalificerad person som fått utbildning.




Viktigt: Vid användning av manschetter och styrbälten/resår, och efter justering av staget, se till att styrbanden/resåren rullar fritt över rullarna. Om inte, justera höjden på U-stag.



Viktigt: På Small modellen levereras den med två nedre stagdelar. Det kortaste staget används på de minsta Small användarna och det längsta staget används på de högsta Small användarna. När barnet växer kan det finnas ett behov av att byta från den kortaste till den längsta delen av det nedre staget.

7.3 Justera höjden på bröststödet, höftbygeln och sätet


Xplore bröststöd, höftstöd och säte använder samma höjdjusteringsprinciper. Genom att lossa knapparna som håller dem på plats kan de justeras till önskad höjd och sedan dra åt dem igen. Kontrollera att konsolerna som vreden är monterade på är ordentligt fästa i staget.

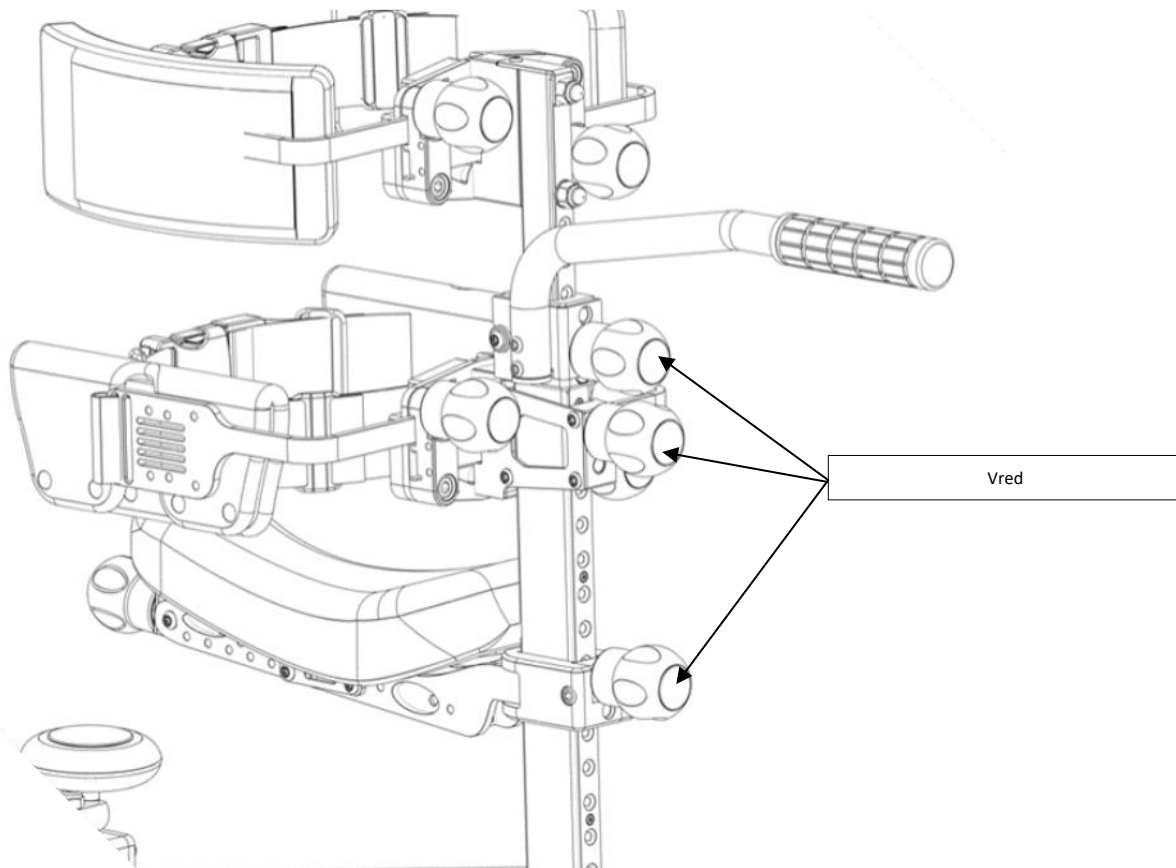

Figur 10: Xplore höjdjustering bröststöd, höftbygel och säte

7.4 Justera bredden på bröststagen och höftbygeln

Xplore Brööststöd och höftstöd använder samma principer för breddjustering. Genom att lossa vreden som håller armarna på bröststödet och höftstödet, kan armarna skjutas utåt eller inåt till önskad bredd. Dra åt vreden igen. Kontrollera att armarna är ordentligt säkra.

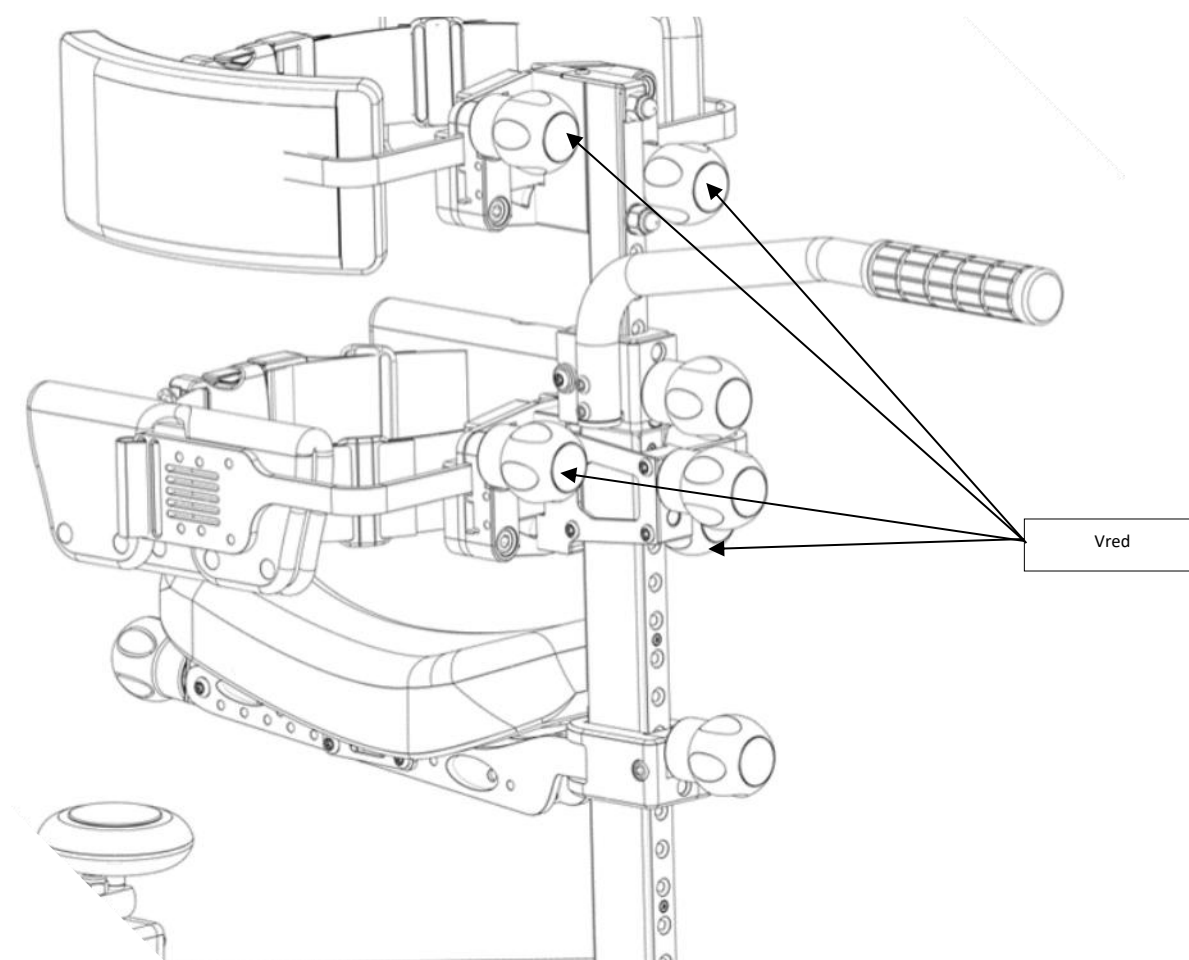

Figur 11: Xplore bröststöd och höftbygel justering

8. Använda Xplore

8.1. Användningstid

Hur länge en användare ska använda Xplore åt gången beror på användarens fysiska och mentala hälsa. Det är assistenter, föräldrar och annan personal runt användaren som ansvarar för att utvärdera detta..

8.2. Utbildning

Det följande förutsätter att Xplore har blivit utprovad och inställd av en representant från Made for Movement eller en annan kvalificerad person. Användarens assistent **SKA** också ha fått den nödvändiga utbildning/upplärning att använda produkten och läst och förstått innehållet i denna bruksanvisningen. Informationen under beskriver hur användaren kommer i och ur Xplore.

8.3. Sko

Xplore ska användas med sko. Se till att skorna sitter på bra vid användning.

8.4. Förberedelse innan användning

Placera Xplore på ett plant underlag och tryck på bromsen. Se till att alla spännen är öppna innan du flyttar användaren till Xplore. Kontrollera att sätet är i rätt höjd. Kontrollera att alla stöd och sätet sitter bra fast.

8.5. Hur kommer användaren i Xplore

Det är 3 primära sätt hur användaren kommer i Xplore; lätt assisterat/lyft, genom personförflyttning eller genom användning av lyftremmar/lyftsele. Gemensamt för alla metoder är att användaren förflyttas till Xplore genom att användaren placeras på sätet. För de minsta och lättaste användarna kan det vara enklast att lyfta användaren till sätet. För tyngre användare kan dessa assisteras över till sätet om de har en funktionsnivå som tillåter det. Användare som behöver mer stöd kan förflyttas över med hjälp av förflyttningsteknik. För tyngre användare kan det vara aktuellt att använda lyftremmar/lyftsele för att trygga förflyttningen och skona medhjälpare/assistenters rygg.

8.6. Säkra användaren i Xplore


Dra åt bromsen genom att trycka ner bromsspaken. Tryck spaken uppåt för att lossa bromsen. Spänn fast bröstbältet och höftbältet omedelbart efter att användaren har flyttat över till sätet. Fäst bröstbältet först och klämma ihop de låsande delarna av bröstbältet tills du hör ett klick, och känner att låset sitter säkert. Fäst sedan höftbältet genom att kontrollera att det bakre höftbältet är vänt bakåt och att bältet är placerat ungefär mitt på användarens höft. Det övre höftbältet ska fästas framför användaren med fästklämmorna monterade på bältet. Tryck ihop dem tills ett klick hörs och känn att låset sitter säkert. Användaren är nu säkrad i Xplore.



Observera att sätet eller säkerhetsremmen måste vara monterat hela tiden för att användaren ska vara säker i produkten. Om du tar bort sätet/säkerhetsremmen kan användaren glida ner och ut ur produkten. Observera också att användaren alltid är säkrad på sätet av assistenten tills bälten sitter fast.



Användaren måste ALLTID bära både bröstbältet och höftbältet så länge användaren är i Xplore. Om det upplevs att bältena hindrar användarens rörelsemönster kan bältena lossas lite och bröstbältet eventuellt sänkas en aning. Användaren får då mer rörelsefrihet samtidigt som säkerheten garanteras.

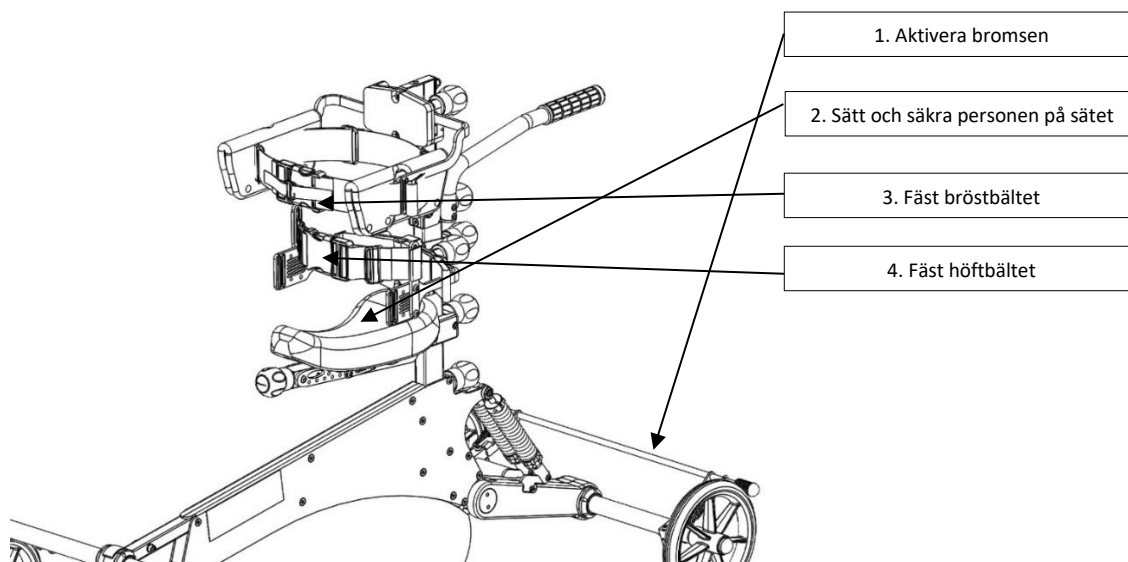

Figur 12: Xplore ordningsföljd för att säkra användaren

8.7. Hur användaren kommer ur Xplore

Kör Xplore nära området där användaren ska flyttas.

Det finns tre primära sätt att få användare till Xplore; lätt assisterad/lyft, vid förflyttning av människor eller vid användning av sele/sele. Gemensamt för alla metoder är att användaren flyttas från Xplore genom att lyfta eller flytta brukaren från sitsen till en stol, rullstol, säng eller liknande. För de minsta och lättaste användarna kan det vara lättast att lyfta brukaren från sitsen. För tyngre användare kan dessa assisteras från sätet om de har en funktionsnivå som tillåter det. Användare som behöver mer stöd kan flyttas över med överföringsteknik. För tyngre användare kan det vara lämpligt att använda en sele eller sele för säker och skonsam rörelse. Vid användning av sele/sele ska dessa fästas på brukaren och i lyft, innan Xplores bröst- och höftbälte lossas för säker rörelse.



Se alltid till att användaren är säkrad av en assistent i alla led genom hela förflyttningen för flyttningen när bältena i Xplore inte är fastsatta på användaren.

9. Utförande av individuella justeringar och efterjusteringar

9.1. Individuell justering / utprovning

- Xplore är ett personligt hjälpmedel och ska endast användas av den personen hjälpmedlet är anpassat till.
- Xplore får endast anpassas av en representant från Made For Movement eller annan kvalificerad person som fått utbildning.

9.2. Justering uppföljning

- Xplore justeras för tillväxt vid behov.
- Xplore får endast justeras om av en representant från Made For Movement eller annan kvalificerad person som fått utbildning.


10. Transport

Xplore kan demonteras för packning eller transport utan att ändra inställningarna.

När du tar bort / installerar bakaxeln och staget behöver du följande verktyg:

En speciellt verktyg för bakaxeln.

Demontering:

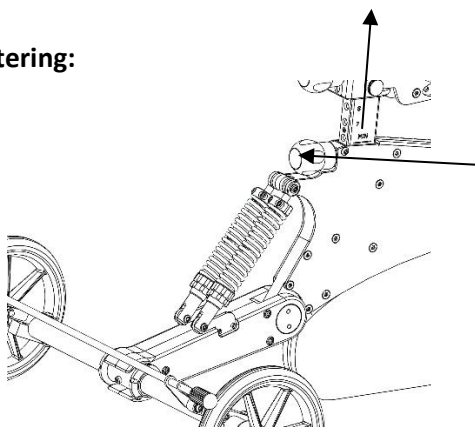


Demontering av staget:

Lossa på vredet ovanför fjädrarna. Lyft ur staget ut ur ramen.

Tips: För att placera staget tillbaka i samma position, räkna antal hål på staget mellan understället och övre stagets justeringskonsol.

Figur 13: Xplore Vredet för att lossna på staget

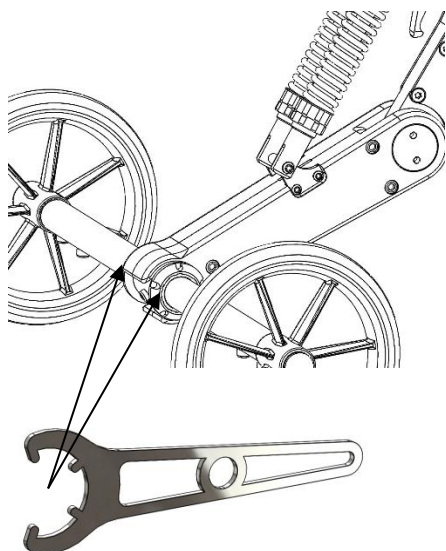


Demontering av bakaxel:

Lossa de koniska muttrarna och dra loss bakaxel bakåt.

Figur 14: Xplore Verktyg för att lossa på koniska muttrar på bakaxeln.

Montering:

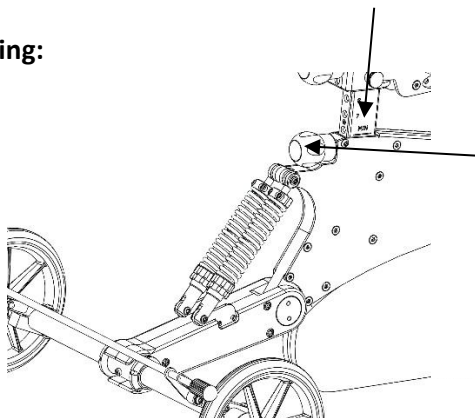


Montering av staget:

Lossa på vredet ovanför fjädrarna. Lyft staget tillbaka i ramen.

Räkna antal hål i staget för rätt placering.

Dra åt vredet och se till staget sitter fast bra.

Figur 15: Xplore Montering av staget

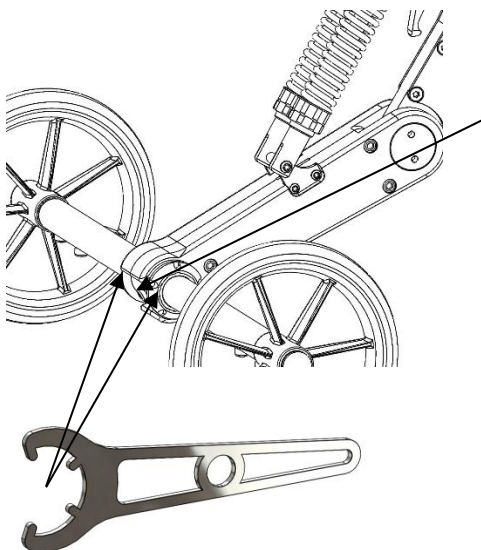

Montering av bakaxel:


Placera bakaxeln in i trailingarmens öppning.

Dra åt de koniska muttrarna på båda sidor av trailingarmen med specialverktyget.

Se till att bakaxeln sitter fast bra.

Figur 16: Xplore Användning av verktyget för att dra åt de koniska muttrarna.

Lyfta produkten:

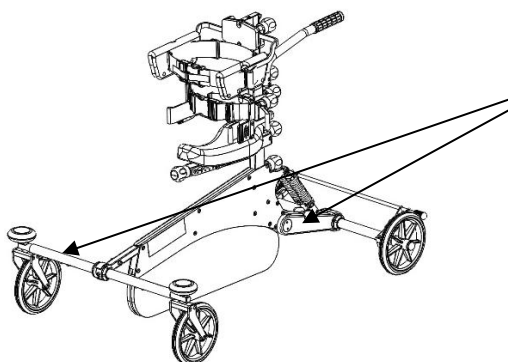


Lyftpunkter:

Lyft produktet genom att hålla i framaxeln och trailingarmen som håller bakaxeln.


Figur 17: Xplore Lyftpunkter.

11. Teknisk information


11.1. Märkning

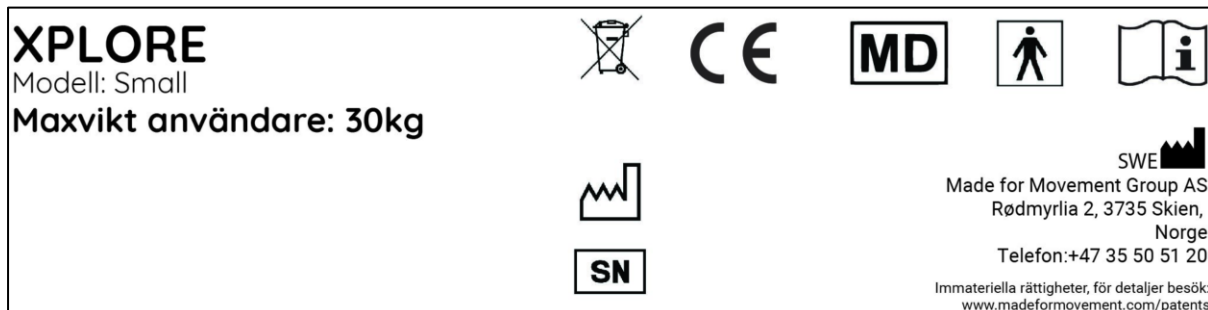

Figur 18: Xplore Small Produktskylt

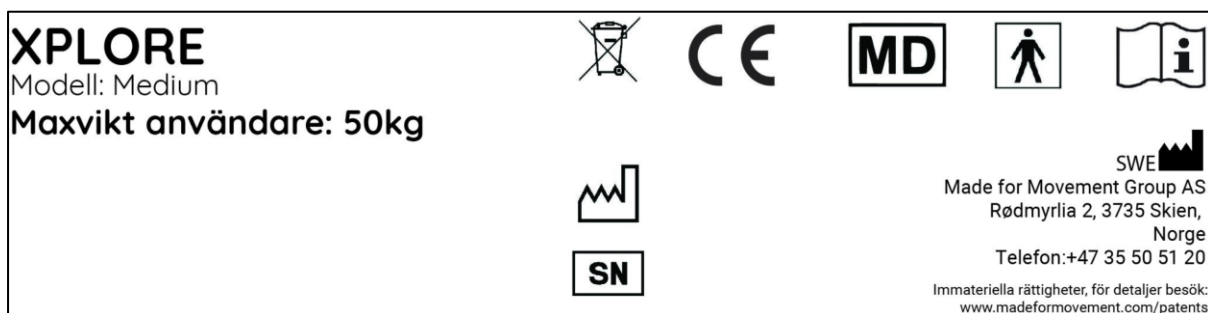

Figur 19: Xplore Medium Produktskylt

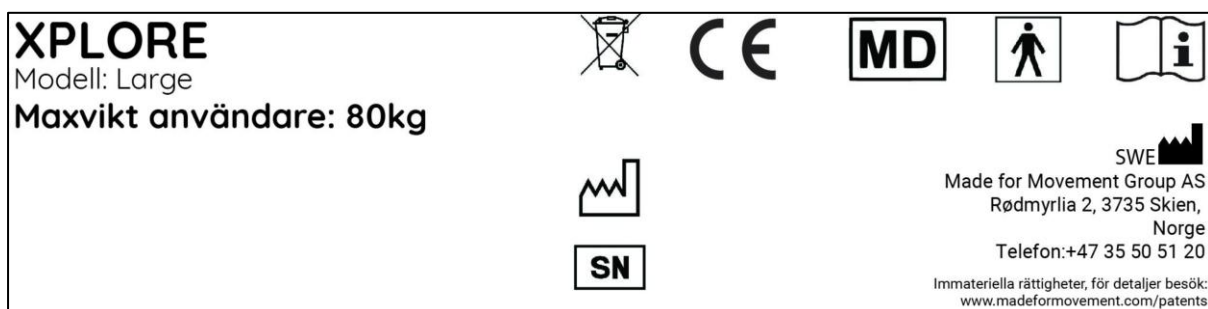

Figur 20: Xplore Large Produktskylt

11.2. Specifikationer och dimensioner Xplore

Xplore	Small	Medium	Large
Max. Produkthöjd:	112,5 cm	110 cm	140 cm
Max. produktlängd:	103 cm	114 cm	127 cm
Max. produktbredd:	55 cm	70 cm	80 cm
Produktvikt:	14,5 kg (15,1 kg**)	16,7 kg	19 kg
Hjul:	185 x 28 mm	185 x 28 mm	185 x 28 mm
Max. vikt på användare:	30 kg	50 kg	80 kg
Rekommenderad längd på användare:	80*-120 cm	110-150 cm	140-180 cm
Höftbredd:	16-35 cm	20-32 cm	28-45 cm
Övre justering stag:	0-28 cm	0-25 cm	0-32 cm
Nedre justering stag:	0-14 (0-12 cm**)	0-12,5 cm	0-16,5 cm
Säte höjd minimum:	37 cm (30 cm*)	43 cm	45 cm
Säte höjd max:	51 cm (64 cm**)	70 cm	88 cm
Svängradie:	100 cm	120 cm	130 cm
Användningsområde: Inomhus	Ja	Ja	Ja
Användningsområde: Utomhus i torrt väder	Ja	Ja	Ja
Minimum produkthöjd ***	52cm u.hs 62cm m.hs	72cm u.hs 82cm m.hs	97cm u.hs 107cm m.hs
Säte bredd	7cm	max. 13.5cm min.7cm	max. 13.5cm min.7cm
Säte djup	22cm (paddingsete)	30cm (sadel)	30cm (sadel)
Bröststöd justeringsintervall	42cm	40cm	38cm
Bröststöd höjd mätt från marken	Min: 53cm Max: 95cm (Min: 70cm Max: 110cm**)	Min: 65cm Max: 105cm	Min: 95cm Max: 133cm
Vikt standard (m. säte och medföljande handtag)	15,4 kg	17,8 kg	20,1 kg
Vikt med tillbehör****	17,1kg (17,7 kg **)	20,4kg	22,4kg
Leveransstorlekar (dimensioner och vikt):			
Stag*****	47x47x16.5cm 5kg	59x47x16.5cm 5.9kg	84x47x30cm 7.2kg
Underställ	93x25x5,5cm 4.3kg	103x33x5,5cm 5.3kg	116x33x5,5cm 5.8kg
Bakaxel	50x15x10cm 1.7kg	70x20x23cm 2.6kg	77x20x23cm 3.2kg
Framaxel	57x20x9cm 1.9kg	70x26x8cm 3kg	77x26x8cm 3.1kg

Profilmål:			
Nedre stag	5x2cm	5x2cm	5x2cm
Övre stag	2,5x1,5cm	2,5x1,5cm	2,5x1,5cm
Ramdel framaxel	2x2cm	2x2cm	2x2cm
Material som kommer i kontakt med användare över tid (applied parts):	Material:	Polstring tjocklek:	Polstring tjocklek:
Bröstpstring	Neopren/Polyester	0,65 cm	0,65 cm
Sätes polstring	Neopren/Polyester	0,65 cm	2,5 cm
Underbens polstring	Neopren/Polyester	1 cm	1 cm
Bendelare	Polycotton/Polyethylene	0,06 cm	0,9 cm
Rygg polstring	Polyetylen		1 cm
Material som kan komma i kontakt med assistent och användare över kortare tid (accessible parts)	Materiale:	Stoff tykkelse:	
Nylonband	Nylon	0,1 cm	
Aluminium	AA6082-T6, EN-AW5754, AA6061	N/A	
Rostfritt stål	AISI304/1.4301,	N/A	
Stål	Domex 600, S355, SS2384 spring steel	N/A	
Plast	POM, Polycarbonat, Polypropylen, Nylon, Acetal	N/A	


** * För de allra minsta användarna är sätesstopningen fäst direkt på chassi för att möjliggöra användning av Xplore så tidigt som möjligt. Sätet tas bort och förvaras under denna period. När användaren växer flyttas sätet tillbaka till konsolen som är fäst i satsfästet på staget igen.*

****** Med längre kolumn.

******* Förkortningar: *u.hs* = utan huvudstöd. *m.hs* = med huvudstöd

******** Med följande tillbehör: Ledsagarhandtag, stödhandtag med fäste, polstringar, huvudstöd, envägslager, riktningsspärr.

********* På Small modellen kommer den med två nedre stagdelar i olika längder, där den kortaste ersätts med den längsta när barnet växer.

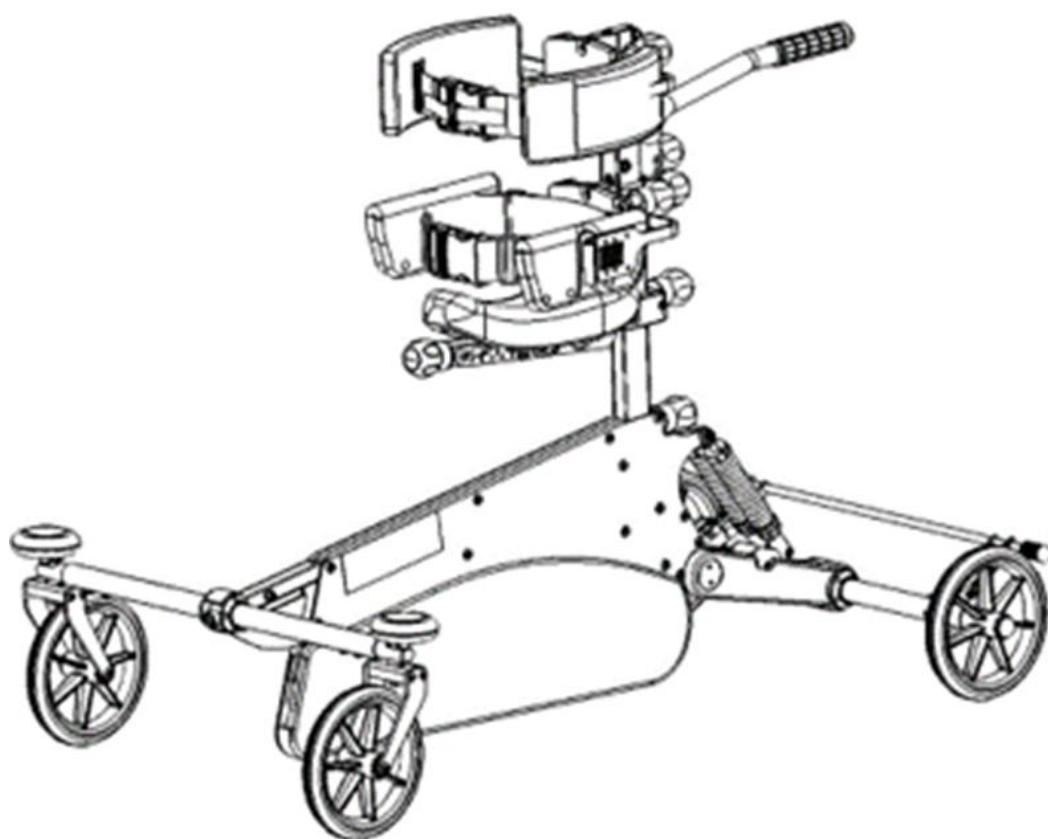


Figur 21: Xplore komplett

12. Ekstrautrustning

12.1. Huvudstöd


Höjdjusterbart nackstöd kan monteras på bröststödfästet. Höjden justeras genom att lossa knopparna som håller nackstödfästet, justera sedan höjden och dra åt knopparna igen för att fixa nackstödet i önskat läge. Vid desinficering av huvudstödet med alkoholbaserade vätskor kan viss svärtning uppstå på duken. Detta är ofarligt och huvudstödet är fortfarande desinficerat.

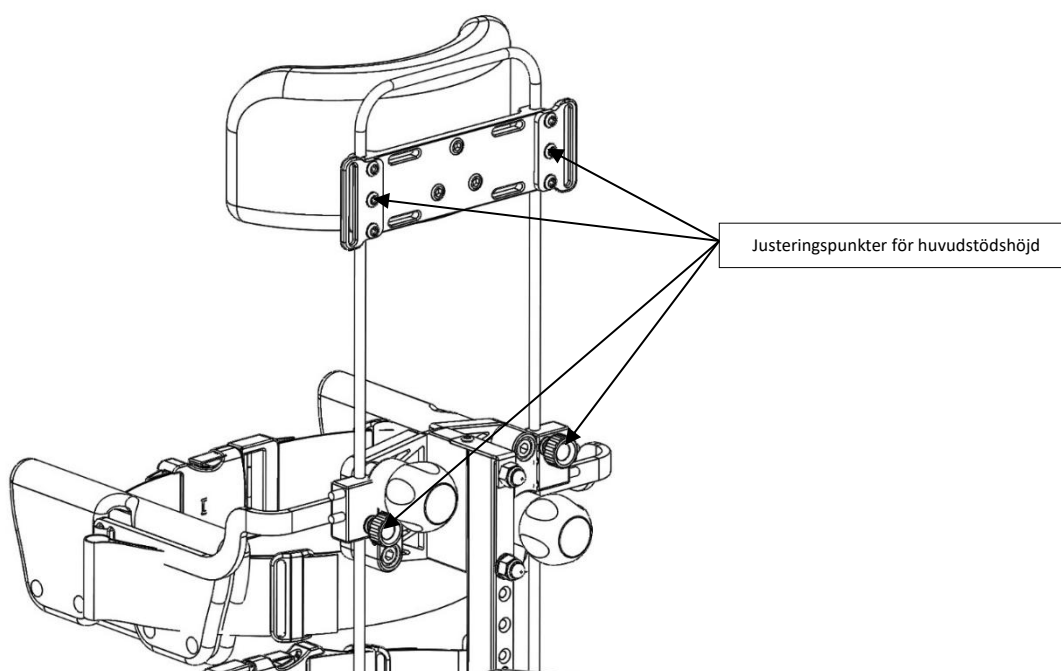

Figur 22: Xplore huvudstöd

12.2. Sidohandtag


Sidohandtag kan monteras på höftstaket om en användare behöver något att hålla fast vid under gång.

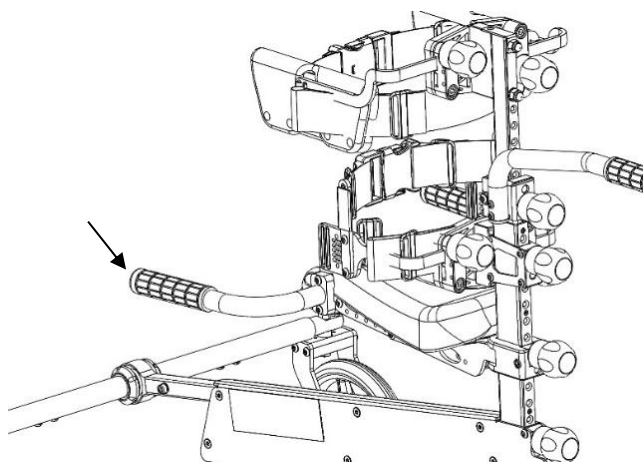

Figur 23: Xplore Sidohandtag

12.3. Ledsagarhandtag

Övre stagets justeringkonsol kan utökas för att montera på en konsol som möjliggör ledsagarhandtag. Ledsagarhandtaget skruvas fast i staget genom att dra åt vredet på konsolen. Genom att justera höjden på nedre staget kan höjden på ledsagarhandtaget justeras. Lyft inte produkten med användaren i produkten, och tryck inte ner handtaget med användaren i produkten för att lyfta framhjulen för att passera hinder. Detta kan bryta handtaget.

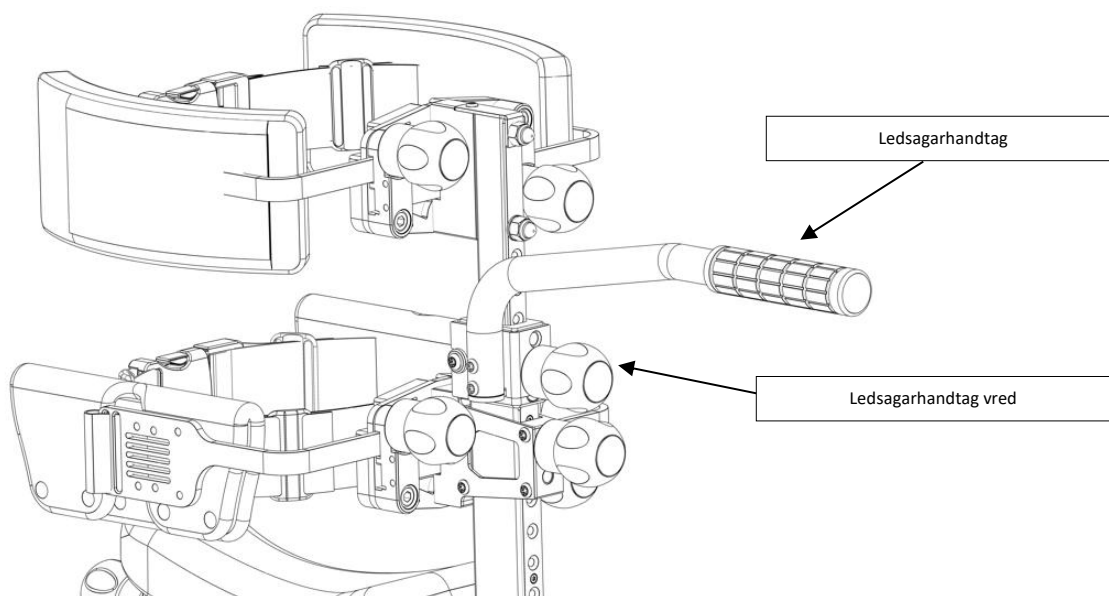

Figur 24: Xplore Ledsagarhandtag

12.4. Korrigeringssystem för lår och fötter

För användare som behöver korrigering av benen och positionering i produkten kan ett korrigeringssystem med manschetter användas. Manschetterna fästs runt användarens ben och/eller lår. Manchetten placeras runt användarens ben och dras åt och fästs med kardborreband. Se till att dessa inte dras åt för hårt eftersom det är obehagligt och kan begränsa blodflödet till benen. Manschetterna har ringfästen.

Spridarrullar är monterade på framaxeln på Xplore, och ett u-rör är monterat på stagets baksida. Styrremmar och/eller resår med fast karbinhake träs genom spridarrullarna och u-rörsrullarna, och fästs i ringfästet på manschetterna. Längden på styrsnörena/resåren justeras så att användaren placeras rätt och har tillräckligt med utrymme att röra sig efter önskemål. Montering och justering av korrigeringssystemet bör utföras av en utbildad person.

Remmar/resårrem har en rad funktioner:

- Förläng användarens ben
- Rätt gångmönster
- Placera benen under användaren
- Dra chassit med sig när användaren går

Både styrbälten eller gudestick kan användas - eller en kombination av dessa. Detta bedöms utifrån användarens behov.


Styrband är mer flexibla jämfört med styrband. De används vanligtvis för att korrigera gångmönster och öka sträckningen över knäna. Bandens flexibilitet ger mer rörelsefrihet

Styrbälten är inte flexibla, men kan vara lämpliga att använda i situationer där det krävs mer kraft för att korrigera ett olämpligt gångmönster. Det blir mindre flexibilitet när användaren går med styrbälten.

När manschetter inte ska användas tar man helt enkelt bort dem på användaren och tar bort remmarna/stickorna för tillfället. Spridningsrullarna och u-röret kan sitta kvar på produkten eftersom de inte hindrar användningen, och de är redo för nästa gång de behövs.



Korrigeringssystemets inställning av styrbälten / resår-remmar kräver kunskap och erfarenhet om detta och måste endast justeras av en representant från Made For Movement eller annan kvalificerad person som har fått utbildning.

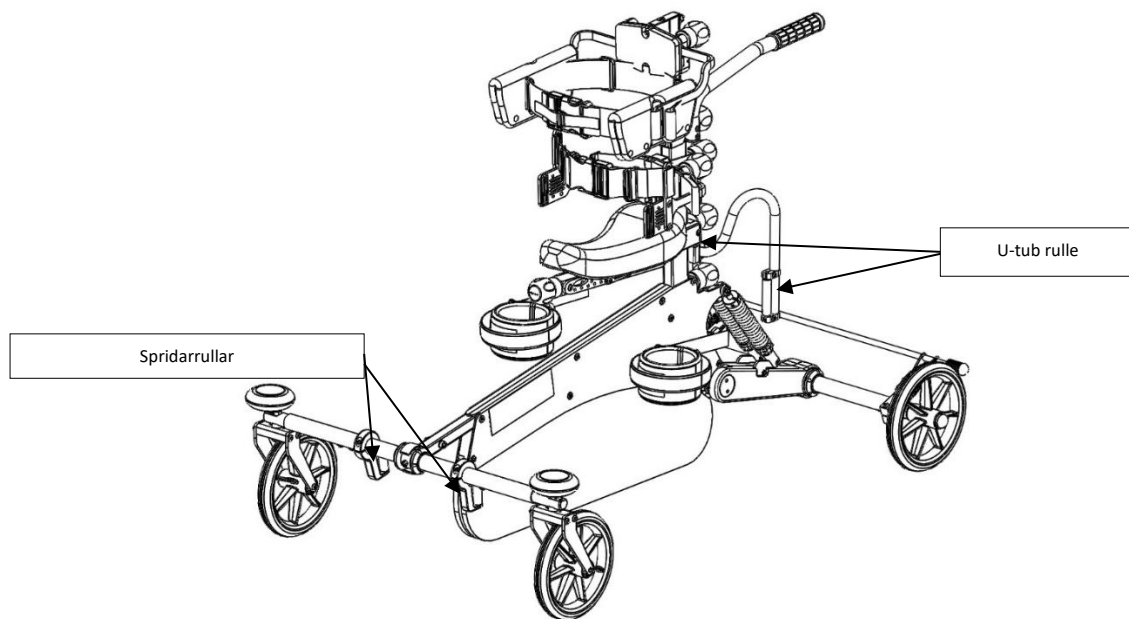

Figur 25: Xplore Spridarullar och u-tub



Figur 26: Xplore Spridarullar och u-tub detaljer

12.5. Används inte

Kapitel används inte.

12.6. Riktningsspärr för hjul

Riktningsspärr kan monteras på framhjulen, så att hjulen låses fast i en rak position. Genom att låsa upp hjulen , kan dessa rotera fritt i 360 grader.

12.7. Envägslager bakhjul


Bakhjulen kan försees med envägsfunktion, så att Xplore endast kan röra sig framåt. Vid förflyttning bakåt låses bakhjulen. Detta kan vara relevant för användare som har utmaningar med att uppnå rörelse framåt.

12.8. Stödhandtag

Stödhandtaget är användbart för användare som behöver stöd för sina händer/armar..

Stödhandtaget finns i två olika storlekar: 310 mm bredd (standard) och 410 mm bred (bred).

Om nödvändigt kapas längden på stödhandtaget för att passa den aktuella användaren.

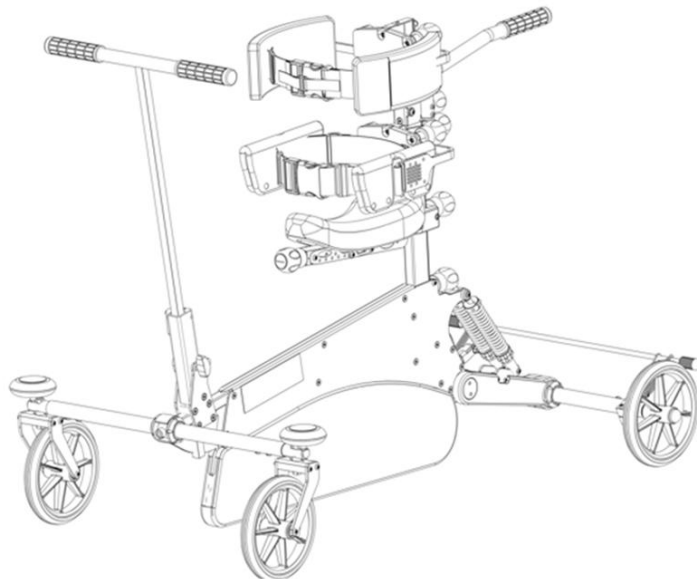

Figur 27: Xplore Stödhandtag

12.9. Säkerhetsrem

Xplore kan användas utan sätet för användare som har bättre benkontroll. Se kapitel 5.2+8.6. Dessa användare måste använda säkerhetsremmen mellan benen för att förhindra att användaren glider ur produkten.



Figur 29: Xplore Säkerhetsrem

12.10. Backspärr

Backspärr kan monteras på bakhjulen så att hjulen endast rullar framåt. Backspärren aktiveras eller inaktiveras enkelt genom att bromsarmen vippas ned bakåt eller till upprätt läge.

13. Tester och godkännningar för Xplore

Xplore och tillhörande extrautrustning är CE-märkt i enlighet med följande standarder:

EU 2017/745 Medical Device Regulation (MDR)

FOR-2021-05-09-1476 Forskrift om medicinsk utstyr

NS-EN 12182 :2012

SS-EN 12182 :2012

DIN EN ISO 11199-3 :2005 §4.3

NS-EN ISO 14971 :2019

NS-EN ISO 13485 :2016

Försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på begäran.

Denna bruksanvisning medföljer produkten. Användarmanualen kan också laddas ner från vår hemsida: www.madeformovement.com

14. Avfallshantering

Alle delarna till Xplore kan återanvändas. Produkten skall levereras till godkänd återvinningsstation. Remmar, resår, polstringar och clips kan behandlas som vanligt hushållsavfall.

15. Rengöring och underhåll

a. Rengöring

Xplore kan rengöras med en mjuk trasa som fuktats med mild tvållösning. Om Xplore används utomhus bör sand och smuts borstas av väl efter användning. Vid desinficering av huvudstödet med alkoholbaserade vätskor kan viss svärtning uppstå på duken. Detta är ofarligt och huvudstödet är fortfarande desinficerat.

Xplore klarar och tål desinfektionsmedel och kan om nödvändigt desinficeras med kommersiella tillgängliga, eller Läkemedelsverkets / VAH / RKI-listade desinfektionsmedel.

Manschetterna och polstringar kan tvättas i maskin, max. 60°C. Undvik användning av torktummlare.

Använd mild tvål!



b. Justering för användartillväxt och funktionsändring

Om det finns behov av att anpassa produkten på grund av användartillväxt och/eller funktionsförändringar ska detta utföras av en Made for Movement-representant eller annan kvalificerad person som har genomgått utbildning i detta.

c. Inspektion och underhåll

Inspektion	
Daglig säkerhetskontroll:	Utför den <u>dagliga</u> säkerhetskontrollen i kapitel 3 före användning.
Månadsvis säkerhetskontroll:	Utför säkerhetskontroll månadsvis enligt beskrivningen i kapitel 3 en gång i månaden.
Säkerhetskontroll funn:	Om saker upptäcks under inspektionen, måste en reparation beställas. Produkten får inte användas igen innan den har reparerats om det inte har överenskommits med representanten att det är OK att använda produkten förrän den har reparerats.

Underhåll	
Rengöring:	Se till att alltid hålla produkten ren. Vid behov, desinficera produkten.
Reparationer:	Reparationer och byte av utslitna delar görs av en Made for Movement- representant eller annan kvalificerad person. Beställ reparationer hos din lokala kontaktperson på Made for Movement.



Viktigt: Om säkerhetskontroll och reparationerna inte utförs, och reparationer dokumenteras, är produktcertifieringen trasig, och Made for Movement ansvarar inte längre för oönskade incidenter, olyckor eller skador som inträffar. Detta ansvar vilar på kunden i det osannolika fallet att säkerhetskontrollen och eventuella reparationer inte utförs. Garantin gäller inte heller om säkerhetskontrollen och reparationerna inte utförs.

Underhållsinformation:

Made for Movement utvecklar och producerar unika stå-, aktivitets- och gånghjälpmedel för funktionshindrade. Produkterna är designade med rörliga delar för att möjliggöra smidig drift och enkel och säker användning. Vissa av de rörliga delarna och andra viktiga delar är slitna under användning och måste bytas ut när de är utslitna. Daglig och månatlig säkerhetskontroll utförs för att säkerställa att produkten är säker att använda över tid, och att slitage upptäcks och repareras.

Typiska slitdelar listas nedan. Även andra delar kan slitas ut till följd av personens användningsoch/eller rörelsemönster och dessa måste även bytas ut när de blir utslitna. Reparationer ska beställas om slitage upptäcks och produkten får inte användas igen förrän produkten har reparerats.

Undantaget är om MFM-representanten bedömer ärendet och definierar att produkten kan användas fram till reparationen, och detta är tydligt överenskommet mellan användaren/assistenten och MFM-representanten.

Exempel på slitdelar som inte omfattas av garantiperioden är; Hjul, stoppning, remmar, bälten, styrlinor, sätesstoppning, broms.

Exempel på delar som kan bli slitna under en period på 2-5 år*; På understället: Gaffel, dämpare, väggavvisare, spridarrullar, fästen till staget, sidoplattdor. På staget: polstringen på ryggplattan, underarmsstöden, höftbyglar, huvudstödsbygeln, huvudstödet. Extrautrustning med polstring, rörliga delar eller delar som är utsatta för starka krafter, kan också bli slitna och bör följaktligen bytas ut om de är slitna.

*Normalt är dessa delar hållbara under produktens förväntade livslängd, men med tanke på att Made for Movement erbjuder rörelse i upprätt läge med belastning för personer som har ett varierat rörelsemönster, vilka delar som behöver bytas på produkten kommer att vara mycket individuella.

Märken är mycket sällan slitna, men om de av någon anledning är slitna och svåra att läsa bör de ersättas med Made for Movement.

Kom ihåg att rengöring och underhåll är nödvändiga för att garantin ska gälla.



Utför inte underhåll när produkten används eller när användaren befinner sig i produkten.

16. Återanvändning

Xplore kan återanvändas till en ny användare efter en avslutad användningsperiod. Om Xplore skall återanvändas, skall produkten levereras tillbaka till Made for Movement eller deras representant. Då utförs en säkerhetsgenomgång återanvändnings service med desinfektion och delar som är slitna byts ut.

Om produkten är äldre än den förväntade livslängden på 5 år, kommer delar som påverkar säkerheten att utvärderas och om så krävs bytas ut.

Följande förutsättningar gäller för återanvändning:

- Tidigare reparationer av produkten har utförts av en representant för Made for Movement, eller annan kvalificerad person.
- Xplore har använts och hanterats i enlighet med denna bruksanvisning.

17. Garanti

Made for Movement ger 2 års garanti på produkten. Garantin täcker inte tillbehör eller speciallösningar från andra företag än Made for Movement. Vanliga slitdelar täcks inte av garantin.

Produktens förväntade livslängd är 5 år.

Följande förutsättningar måste vara uppfyllda för att garantin ska gälla:

- Reparationer och underhåll av produkten har utförts av en representant för Made for Movement, eller annan kvalificerad person.
- Säkerhetskontroll och underhåll (kapitel 3 + 15) har utförts och reparationer kan dokumenteras.
- Reparationer som omfattas av garantin måste klargöras med Made for Movement Group AS

innan produkten repareras. Garantianspråk måste skickas till Made for Movement inom rimlig tid (max 2 månader). Framställs anspråk efter detta kan rätten till garanti förfalla.

- Produkten har inte byggts om eller reparerats av någon annan än en Made for Movement-representant.
- Produkten har hållits ren.
- Produkten har använts och behandlats i enlighet med denna bruksanvisning.

Om produkten inte skulle fungera tillfredsställande, kontakta Made for Movement eller annan auktoriserad representant på telefon +46(33)210880 eller mejla till info.se@madeformovement.com.



Vänligen meddela Made for Movement om produkten inte fungerar korrekt eller som förväntat. Använd inte produkten förrän den har reparerats.


18. Försäkran om överensstämmelse

Försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på begäran.
Se kapitel 13 för godkännanden.

Producent:

Made for Movement Group AS
Rødmyrlia 2
3735 Skien
Norway

Tel. +47 35 50 51 20
Fax +47 35 50 51 21
info.no@madeformovement.com
www.madeformovement.com
BRN: NO 991 237 615 VAT

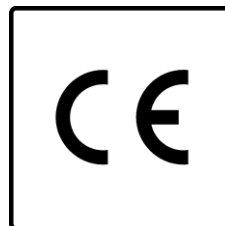

Bilaga 1 – Utbildning av användare och/eller assistent

Utbildning och assistenter

Innan du börjar använda produkten måste användaren eller assistenten utbildas på hjälpmedlet av en representant för Made for Movement, eller annan kvalificerad person.

Endast utbildade användare/assistenter får använda produkten.

Utbildningsprogrammet består minst av följande områden.

Användaren/assistenten har genomgått utbildning inom följande ämnen:

Xplore Utbildning:	Utförd: Ja/Nej
Information som anger att endast utbildade assistenter får använda produkten	
Försiktighetsåtgärder, indikationer och kontraindikationer för användning	
Säkerhetskontroll	
Säkerhetsfunktioner	
Förflyttning, fäst och lossa användaren til produkten	
Använd och gå i produkten	
Användning av lyftband	
Användning av broms	
Fastsättning och användning av extrautrustning	
Säker demontering och montering av produkten för transport	
Vid användning; observation och kontroll av patienten	
Överlämning av bruksanvisningen och förklaring av vad den innehåller	
Använda QR-koden på produkten	
Bedöma behovet av justeringar i takt med att användaren växer	

Ange N/A (Ej tillämpligt) för ämnen som inte är relevanta i detta fall

Datum/plats:

Innowalk serienummer:

Utbildad av:

Utbildningsmottagare:

Utbildning av andra av superanvändare

En superanvändare kan utbilda andra assistenter/vårdgivare. En superanvändare har utbildats i hur man använder produkten av en Made for Movement-representant och är officiellt godkända för att arbeta med produkten. Superanvändaren kommer att utbilda andra assistenter/vårdgivare i enlighet med bruksanvisningen och använda Bilaga 1 under utbildning.

Assistenter/vårdgivare som har utbildats av superanvändaren ska anges nedan.

Dokumentet nedan, ifyllt, ska förvaras på en säker plats där produkten används, och i enlighet med GDPR så att inga personuppgifter blir offentligt tillgängliga. Dokumentet ska tillhandahållas till Made for Movement på begäran.

Observera att endast personer som har utbildats får använda produkten tillsammans med användaren.

Produktens serienr: _____

Användarinitialer: _____ (användaren är den person (anonymiserad som använder produkten)

Superanvändare (namn): _____ (superanvändare ansvarar för vidareutbildning)

Utbildad av (namn): _____ (MFM-representant som genomförde utbildningen)

Plats + datum för superanvändarutbildningen: _____


Personer som har mottagit utbildning av superanvändare:	Datum för utbildning:

Bilaga 2 – Monteringsanvisning

Huvuddelarna i Xplore monteras enkelt endast med hjälp av ett specialverktyg och handkraft. Illustrationerna nedan visar hur.



Steg 1

Fäst framaxeln på ramen med specialverktyget. Dra åt båda muttrarna ordentligt.

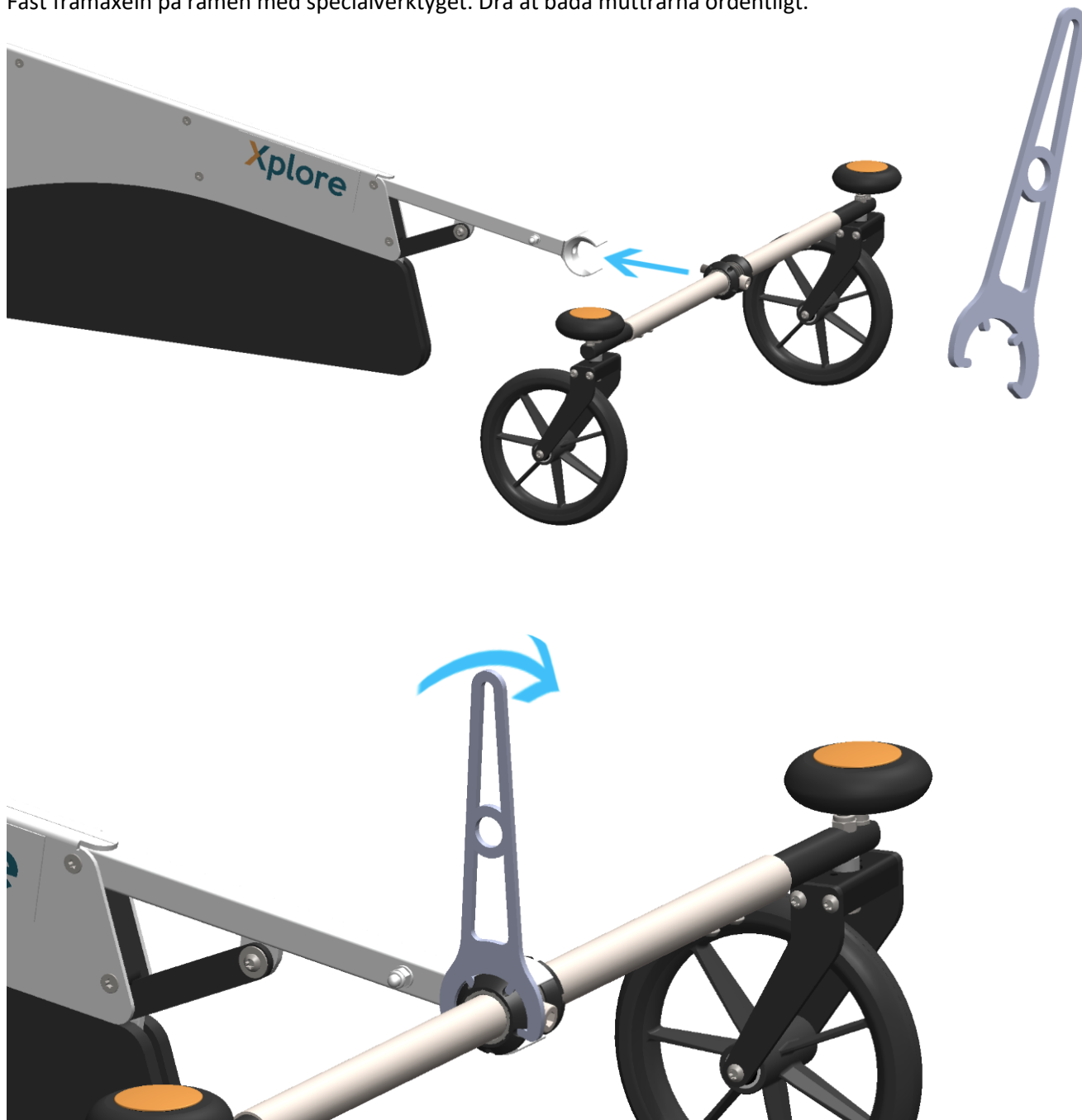

Steg 2


Fäst bakaxeln till ramen med specialverktyget. Dra åt båda muttrarna ordentligt.

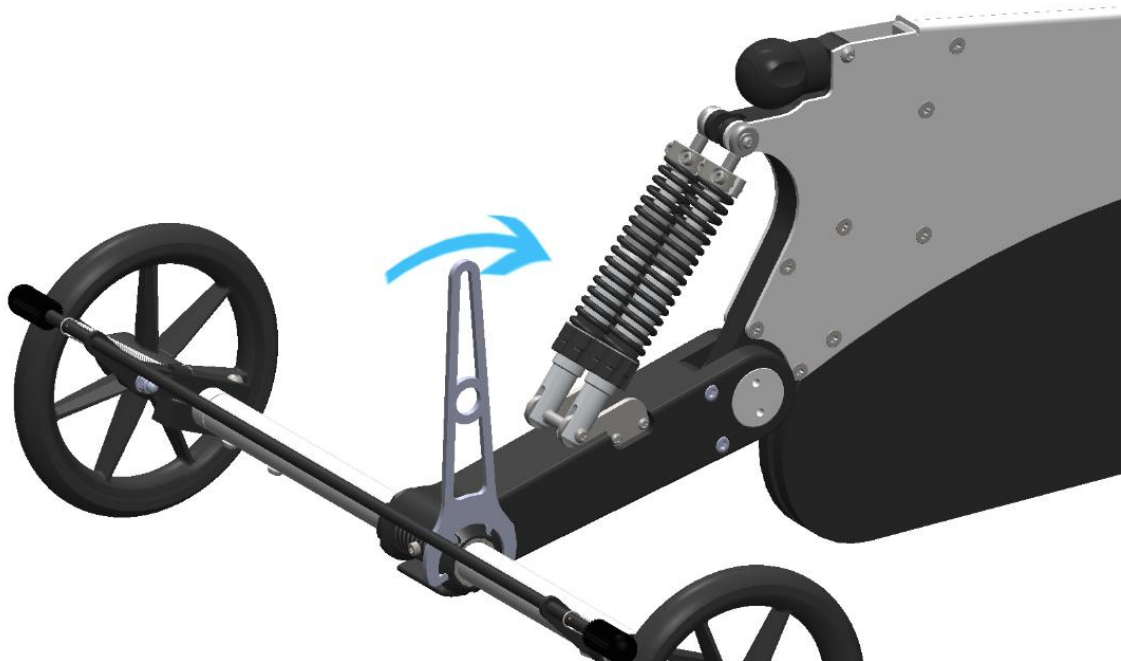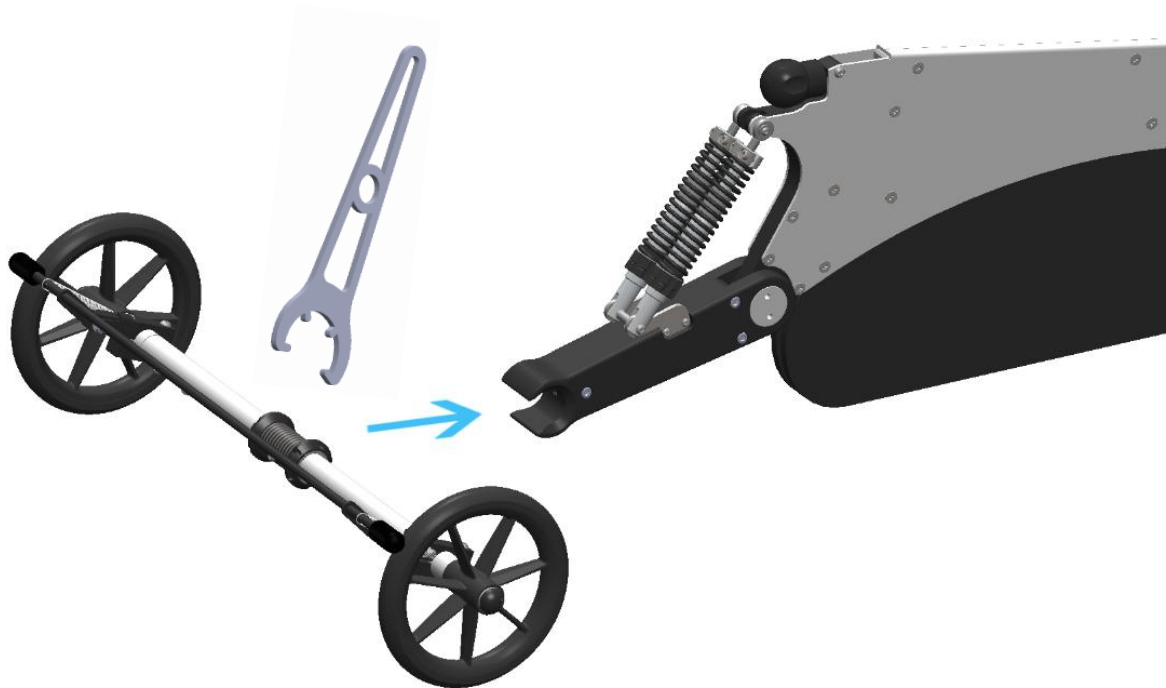

Steg 3

Sits: Skjut in sätet i sättesfästet.

Ledsagarhandtag: Skruva loss åtdragningshandtaget (1.). För in det handtaget i fästet (2.) Sätt in och dra åt åtdragningshandtaget igen.

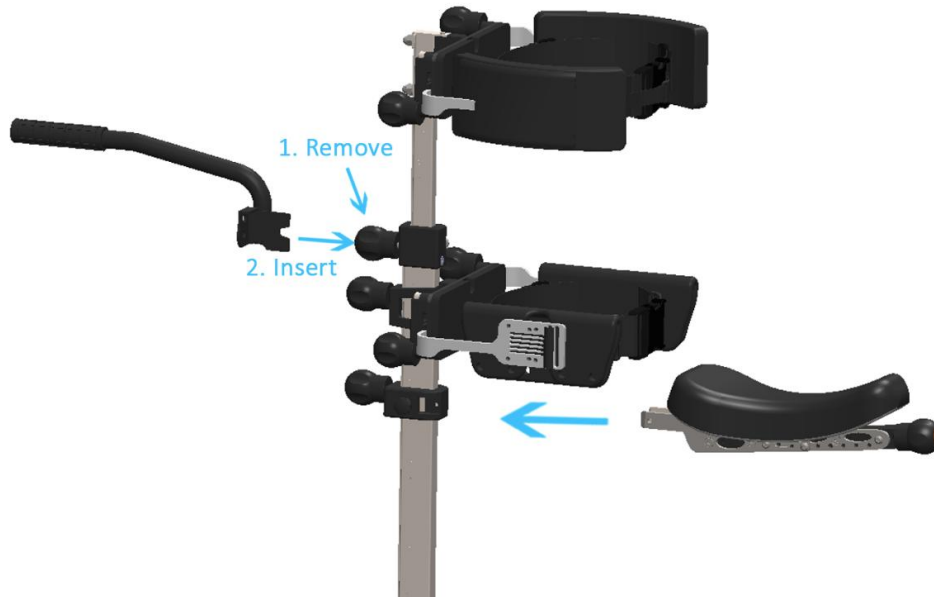

Steg 4

Lossa åtdragningshandtaget som är fäst vid chassit och skjut in kolonnen i chassit. Skruva fast åtdragningshandtaget för att säkra staget. Dra åt ordentligt.



Steg 5

Produkten är klar att användas

Bruksanvisning för Xplore

Version 2.60 - Version datum: 22.05.2025

Sida 46 av 47



Bilaga 2 - Rev 01/20 CTS 11.11.20